

# MANUTENZIONE DELLE TURBINE




Riferirsi alle istruzioni per l'uso per le procedure complete di manutenzione, pulizia e sterilizzazione. Questo dispositivo medico è fornito «non sterile». Prima di utilizzarlo attenersi alla presente procedura.

## AVVERTENZA GENERALE

⊘ Non immergere lo strumento in un bagno di NaCl o in un bagno a ultrasuoni.


## 1 PREPARAZIONE

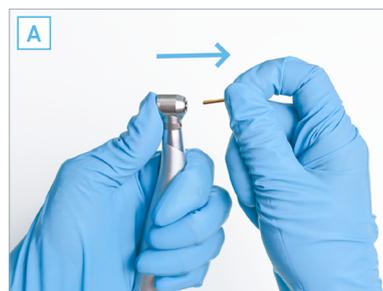

### A. ESTRAZIONE DELLA FRESA

- Rimuovere la fresa dal sistema di bloccaggio.

## 2 PULIZIA PRELIMINARE

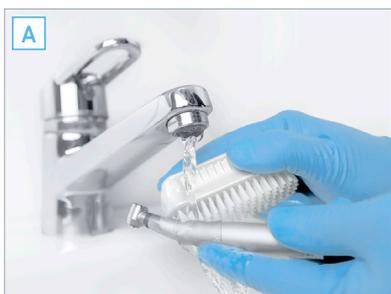

### A. LAVAGGIO DEL DISPOSITIVO

- Pulire la parte interna ed esterna del dispositivo con acqua corrente.



### B. RIMOZIONE DI SPORCIZIA/DEPOSITI

- Asciugare gli ugelli e il resto della fresa con una garza sterile in tessuto non-tessuto (tessuti con scarsa formazione di pelucchi).

## 3 DISINFEZIONE



### A. PULIZIA E DISINFEZIONE

- Immergere il dispositivo in un bagno contenente un detergente/disinfettante.
- Spazzolare il dispositivo con una spazzola morbida flessibile. NON USARE una spazzola metallica.
- Sciacquare il dispositivo due volte con acqua corrente.



### B. OPZIONALE: DISINFEZIONE AUTOMATICA

- Eseguire un lavaggio o una pulizia/disinfezione automatici.\*\*
- Dopo la pulizia/disinfezione verificare l'assenza di residui di detergente e, se necessario, effettuare un ulteriore risciacquo.
- Dopo la pulizia/disinfezione verificare che il dispositivo sia asciutto. Se necessario, asciugare manualmente il dispositivo (vedere 4).

\*\*Per maggiori informazioni riferirsi alle istruzioni per l'uso del produttore

# MANUTENZIONE DELLE TURBINE

## 4 PULIZIA E ASCIUGATURA MANUALI



### A. PULIZIA E ASCIUGATURA INTERNE ED ESTERNE CON SPRAYNET

- Agitare il flacone Spraynet prima dell'uso.
- Scegliere l'ugello Spraynet adeguato ①\*
- Tenere la testa dello strumento rivolta verso il basso e proteggerla con un panno sterile in tessuto non-tessuto.
- Azionare Spraynet.



- Asciugare l'esterno del turbine con un panno imbevuto di Spraynet.

⚠ Asciugare sempre il dispositivo.


## 5 LUBRIFICAZIONE

### A. LUBRIFICAZIONE CON LUBRIMED



(Per le turbine 2-3 e 4 vie, vedere riquadro sottostante)

### O B. LUBRIFICAZIONE CON LUBRIFLUID

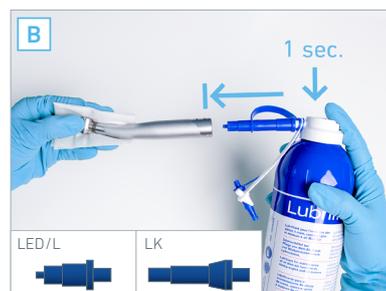

- Agitare il flacone Lubrifluid prima dell'uso.
- Utilizzare l'ugello Lubrifluid ①\*
- Scegliere l'adattatore Lubrifluid adeguato ②\*
- Tenere la testa dello strumento rivolta verso il basso e proteggerla con un panno assorbente.
- Azionare Lubrifluid.




# MANUTENZIONE


## ACCESSORI



**SPRAYNET**  
Spray per pulizia 500 ml  
Confezione da 6 flaconi  
ART. 1600036-006

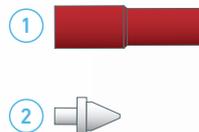

**LUBRIFLUID**  
Lubrificante 500 ml  
Confezione da 6 flaconi  
ART. 1600064-006

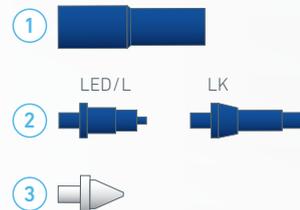

**LUBRICARE 2**  
Sistema per la manutenzione  
ART. 1601156-001



**LUBRIMED**  
Confezione da 6 flaconi  
ART. 1600037-006