


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУРБИННОГО НАКОНЕЧНИКА

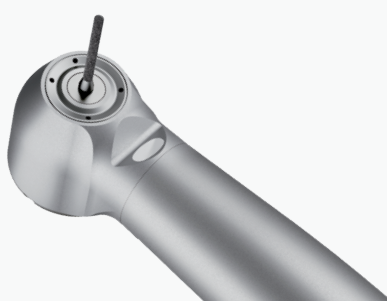

Полная процедура очистки и стерилизации приведена в инструкции по использованию изделия. Данное медицинское изделие поставляется нестерильным. Выполняйте данную процедуру перед использованием изделия.

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

⊘ Запрещено класть инструмент в ванну с раствором хлорида натрия или в устройство ультразвуковой очистки.


1 ПОДГОТОВКА



A. ИЗВЛЕЧЕНИЕ БОРА

- Извлеките бор из зажима.

2 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА

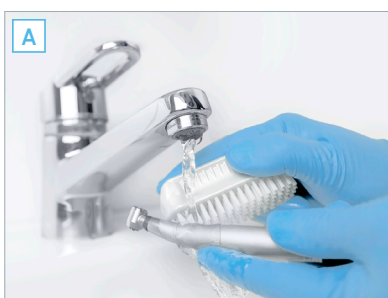

A. ОПОЛАСКИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

- Промойте инструмент снаружи и внутри струей проточной воды (15–38 °C), при условии, что местная водопроводная вода имеет pH в диапазоне 6,5–8,5 и содержание хлоридов до 100 мг/л. Если местная водопроводная вода не соответствует этим требованиям, используйте вместо нее деминерализованную (деионизированную).



B. УДАЛЕНИЕ ГРЯЗИ/ОТЛОЖЕНИЙ

- Сначала высушите каналы внутреннего спрея, затем протрите остальную часть инструмента стерильной салфеткой из нетканого материала (текстиль с низким содержанием ворса).

3 ДЕЗИНФЕКЦИЯ



A. ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

- Кратковременно поместите инструмент в ванну с чистящим/дезинфицирующим средством.
- Внимание: инструмент нельзя замачивать!
- Очистите инструмент мягкой гибкой щеткой. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ проволоочную щетку.
- Дважды ополосните инструмент под проточной водопроводной водой.



B. ДОПОЛНИТЕЛЬНО: АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

- Выполните автоматическую мойку или очистку/дезинфекцию.**
- После очистки/дезинфекции проверьте отсутствие остатков моющего средства и при необходимости выполните дополнительное ополаскивание.
- После очистки/дезинфекции убедитесь, что инструмент сухой. При необходимости вручную высушите инструмент (см. 4).

**Для получения дополнительной информации см. инструкции по использованию

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


ТУРБИННОГО НАКОНЕЧНИКА

4 РУЧНЫЕ ОЧИСТКА И СУШКА



A. ОЧИСТКА И СУШКА ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА SPRAYNET

- Встряхните баллон со средством Spraynet перед использованием.
- Подберите правильную насадку для средства Spraynet ①*
- Держите инструмент кончиком вниз и защитите его стерильным нетканым материалом.
- Нажмите на баллон со средством Spraynet.

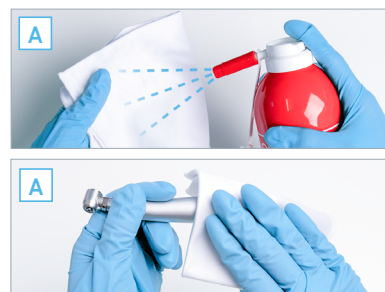

- Высушите наружную поверхность турбинного наконечника салфеткой, смоченной средством Spraynet.

⚠ Обязательно высушите инструмент.


5 СМАЗКА

A. СМАЗКА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА LUBRIMED ИЛИ



(Для 2-/3-канальных и 4-канальных турбинных наконечников см. вкладку ниже)

B. СМАЗКА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА LUBRIFLUID

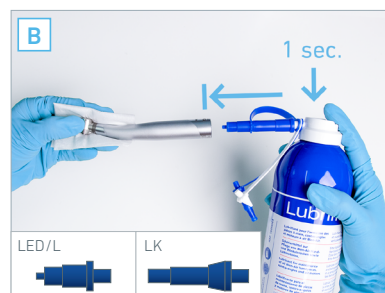

- Встряхните баллон со средством Lubrifluid перед использованием.
- Используйте насадку для средства Lubrifluid ①*
- Подберите насадку для средства Lubrifluid ②*
- Держите инструмент кончиком вниз и подложите под него впитывающую ткань.
- Нажмите на баллон со средством Lubrifluid.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТУРБИННОГО НАКОНЕЧНИКА

ТОЛЬКО ДЛЯ 2-/3-КАНАЛЬНЫХ И 4-КАНАЛЬНЫХ ТУРБИННЫХ НАКОНЕЧНИКОВ



В'. СМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СРЕДСТВОМ LUBRIFLUID ТОЛЬКО ДЛЯ 2-/3-КАНАЛЬНЫХ И 4-КАНАЛЬНЫХ ТУРБИННЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

- Используйте насадку для средства Lubrifluid ① *
- Подберите насадку для средства Lubrifluid ③ *
- Держите инструмент кончиком вниз и подложите под него впитывающую ткань; нажимайте на баллон со средством Lubrifluid в течение одной секунды.

△ Распылите в отверстие, как показано на рисунках для 2-/3-канальных турбинных наконечников и 4-канальных турбинных наконечников.

6 СТЕРИЛИЗАЦИЯ



А. ПОМЕСТИТЕ ТУРБИННЫЙ НАКОНЕЧНИК В ПАКЕТ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ



В. ПРОВОДИТЕ СТЕРИЛИЗАЦИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

- Только инструменты с маркировкой  допускается стерилизовать в автоклаве.

△ Стерилизуйте только качественно очищенные, высушенные и смазанные инструменты.

*Все насадки представлены на последней странице данного документа.

Полный текст инструкций можно скачать с сайта: <https://dental.bienair.com/ifu>

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



SPRAYNET

Чистящее средство в виде спрея, 500 мл
Комплект из 6 шт.
АРТ. 1600036-006



LUBRIFLUID

Смазочное средство, 500 мл
Комплект из 6 шт.
АРТ. 1600064-006



LUBRICARE 2

Устройство для
технического
обслуживания
АРТ. 1601156-001



LUBRIMED

Комплект из 6 шт.
АРТ. 1600037-006