



MAINTENANCE

DES CONTRE-ANGLES ET PIÈCES À MAIN DE CHIRURGIE ET IMPLANTOLOGIE.

Reportez-vous à la notice d'utilisation du produit pour les procédures complètes d'entretien de nettoyage et de stérilisation. Ce dispositif médical est livré «non stérile». Avant qu'il ne soit utilisé, veuillez vous conformer à la présente procédure.

1 PRÉPARATION



A. RETRAIT DE L'OUTIL


- Retirez l'instrument rotatif du système de serrage
- Découplez le contre-angle du moteur

B. PRÉ-DÉSINFECTION

- Désinfection externe avec une solution pour instruments dentaires

⊘ Ne pas immerger l'instrument dans un bain désinfectant.

2 NETTOYAGE

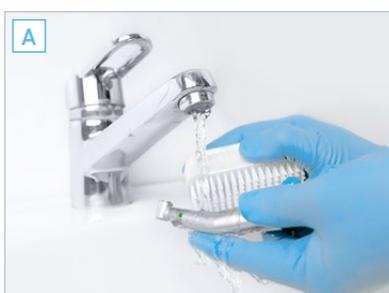

A. NETTOYEZ À L'EAU COURANTE <38°

B. CURETAGE

- Éliminez minutieusement la saleté et les dépôts éventuels des buses à l'aide du débouche spray
- Séchez les buses avec de l'air comprimé puis le reste de l'instrument avec un chiffon

⊘ Ne pas immerger dans un bain à ultrasons



C. NETTOYAGE INTERNE AVEC AQUACARE

- Secouez l'Aquacare avant l'utilisation
- Utilisez l'embout Aquacare ①*
- Maintenez l'instrument tête vers le bas protégée par un chiffon absorbant et actionnez le bouton de l'Aquacare pendant 2 secondes
- Utilisez l'embout Aquacare ③*
- Maintenez l'instrument tête vers le bas protégée par un chiffon absorbant et actionnez le bouton de l'Aquacare pendant 2 seconde



D. NETTOYAGE INTERNE ET EXTERNE AVEC DU SPRAYNET

- Secouez le Spraynet avant l'utilisation
- Utilisez l'embout Spraynet ①*
- Maintenez l'instrument tête vers le bas protégée par un chiffon absorbant et actionnez le bouton du Spraynet pendant 1 seconde
- Nettoyez l'extérieur du contre-angle avec un chiffon imbibé de Spraynet

* Toutes les références des embouts se trouvent sur la dernière page du document.

3

DÉSINFECTION



A. DÉSINFECTION À L'AIDE DE DÉSINFECTANT DE SURFACES (respecter les indications d'utilisation du fabricant)

⊘ Ne pas immerger l'instrument dans un bain désinfectant

OU

B. DÉSINFECTION THERMIQUE

(respecter les indications d'utilisation du fabricant)



4

LUBRIFICATION



A. LUBRIFICATION AVEC LUBRIFLUID

- Secouez le **Lubrifiant** avant l'utilisation
- Utilisez l'embout **Lubrifiant** ①*
- Maintenez l'instrument tête vers le bas protégée par un chiffon absorbant et actionnez le bouton du **Lubrifiant** pendant 1 seconde
- Effectuez ensuite un test de fonctionnement pendant 30 sec à basse vitesse pour éliminer le surplus éventuel de lubrifiant
- Stockage immédiat: placez les instruments tête vers le bas afin que les résidus d'huile puissent s'écouler

5

STÉRILISATION



A. PLACEZ LE CONTRE-ANGLE DANS UN SACHET DE STÉRILISATION

B. STÉRILISEZ SELON LES INDICATIONS DU FABRICANT

- Les instruments portant le symbole  peuvent être stérilisés en autoclave


⚠ Ne stériliser que des instruments nettoyés et lubrifiés

MAINTENANCE


ACCESSOIRES




SPRAYNET
500 ml spray de nettoyage.
Emballage de 6 pièces
REF. 1600036-006

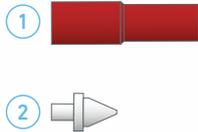

LUBRIFLUID
500 ml lubrifiant
Emballage de 6 pièces
REF. 1600064-006

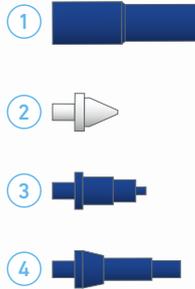

AQUACARE
500 ml spray de nettoyage.
Emballage de 6 pièces
REF. 1600617-006

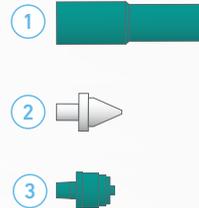

LUBRICARE
Système de maintenance
REF. 1600915-001



LUBRIMED
Emballage de 6 cartouches
REF. 1600037-006



DÉBOUCHE SPRAY
Emballage de 10 pièces
REF. 1000001-010