



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ХИРУРГИЧЕСКИХ И ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКИХ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

Обратитесь к инструкции по использованию средства для проведения комплексных процедур по уходу, очистке и стерилизации. Этот медицинский инструмент не является стерильным. Перед первым использованием выполните данную процедуру.



1 ПОДГОТОВКА



A. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

B. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

2 ОЧИСТКА

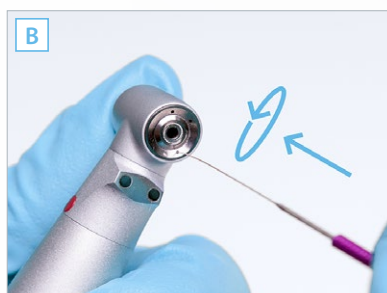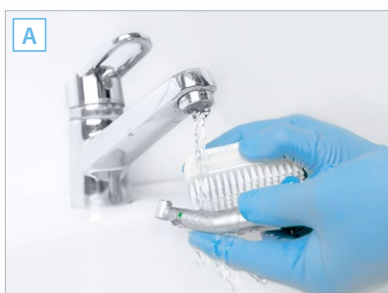

A. ОЧИСТИТЕ ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ <38 °C

B. ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

- Тщательно удалите жировые загрязнения и возможные отложения из спреевых каналов с помощью чистящей иглы

- Просушите спреевые каналы сжатым воздухом, а потом насухо вытрите весь инструмент тканью

⊘ Никогда не погружайте инструмент в ультразвуковую ванну



C. ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА AQUACARE


- Перед использованием встряхните средство Aquacare

- Используйте насадку Aquacare ① *

- Держите инструмент верхней частью вниз, закрыв ее впитывающей тканью, и нажмите на кнопку средства Aquacare на 2 секунды

- Используйте насадку Aquacare ③ *

- Держите инструмент верхней частью вниз, закрыв ее впитывающей тканью, и нажмите на кнопку средства Aquacare на 1 секунду

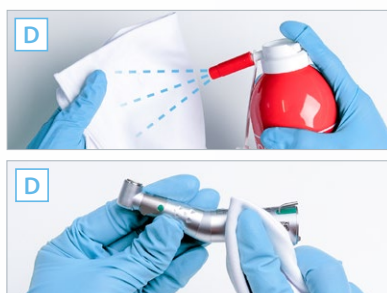

D. ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОЧИСТКА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА SPRAYNET

- Перед использованием встряхните Spraynet

- Используйте насадку Spraynet ① *

- Держите инструмент верхней частью вниз, закрыв ее впитывающей тканью, и нажмите на кнопку средства Spraynet на 1 секунду

- Снаружи очистите угловой наконечник тканью, смоченной средством Spraynet

3 ДЕЗИНФЕКЦИЯ



A. ДЕЗИНФЕКЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ (соблюдайте указания производителя по использованию средства)

⊘ Не погружайте инструмент в дезинфекционную ванну

ИЛИ

B. ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ
(соблюдайте указания производителя по использованию средства)

4 СМАЗКА



A. СМАЗКА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА LUBRIFIUID

- Перед использованием встряхните средство Lubrifiuid
- Используйте насадку Lubrifiuid ①*
- Держите инструмент верхней частью вниз, закрыв ее влагопоглощающей тканью, и нажмите на кнопку средства Lubrifiuid на 1 секунду
- Затем проверьте работоспособность инструмента в течение 30 секунд на низких оборотах, чтобы удалить возможные излишки смазочного средства
- Хранение сразу после смазки: поместите инструменты верхней частью вниз, чтобы остатки масла могли стечь

5 СТЕРИЛИЗАЦИЯ



A. ПОМЕСТИТЕ УГЛОВОЙ НАКОНЕЧНИК В СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ ПАКЕТ

B. СТЕРИЛИЗУЙТЕ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

- Инструменты с символом  можно стерилизовать в автоклаве

⚠ Стерилизуйте только очищенные и смазанные инструменты

* См. полный список артикулов насадок на последней странице документа.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



SPRAYNET
чистящее средство в виде
спрея, 500 мл
6 штук в упаковке
APT. 1600036-006



LUBRIFIUID
смазочное средство в виде
спрея, 500 мл
6 штук в упаковке
APT. 1600064-006



AQUACARE
чистящее средство в виде
спрея, 500 мл
6 штук в упаковке
APT. 1600617-006



LUBRICARE
Прибор для ухода за
инструментами
APT. 1600915-001



LUBRIMED
6 картриджей в упаковке
APT. 1600037-006



ЧИСТЯЩАЯ ИГЛА
10 штук в упаковке
APT. 1000001-010