



# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## ХИРУРГИЧЕСКИХ И ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКИХ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ


Обратитесь к инструкции по использованию средства для проведения комплексных процедур по уходу, очистке и стерилизации. Этот медицинский инструмент не является стерильным. Перед первым использованием выполните данную процедуру.

### 1 ПОДГОТОВКА



**A. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА**  
**B. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ**

### 2 ОЧИСТКА

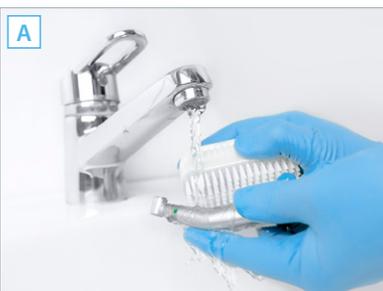

**A. ОЧИСТИТЕ ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ <38 °C**

**B. ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ / ТОЛЬКО ДЛЯ СА 1:2.5**


- Тщательно удалите жировые загрязнения и возможные отложения из спреевых каналов с помощью чистящей иглы
- Просушите спреевые каналы сжатым воздухом, а потом насухо вытрите весь инструмент тканью

⊘ **Никогда не погружайте инструмент в ультразвуковую ванну**



**C. ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА AQUACARE**

- Перед использованием встряхните средство Aquacare
- Используйте насадку Aquacare ①\*
- Держите инструмент верхней частью вниз, закрыв ее влагопоглощающей тканью, и нажмите на кнопку средства Aquacare на **2 секунды**
- Используйте насадку Aquacare ③\*
- Держите инструмент верхней частью вниз, закрыв ее влагопоглощающей тканью, и нажмите на кнопку средства Aquacare на **1 секунду**

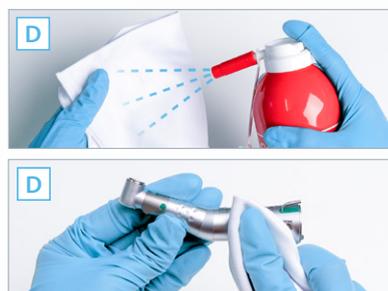

**D. ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОЧИСТКА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА SPRAYNET**

- Перед использованием встряхните Spraynet
- Используйте насадку Spraynet ①\*
- Держите инструмент верхней частью вниз, закрыв ее влагопоглощающей тканью, и нажмите на кнопку средства Spraynet на 1 секунду
- Снаружи очистите угловой наконечник тканью, смоченной средством Spraynet

\* См. полный список артикулов насадок на последней странице документа.

## 3 ДЕЗИНФЕКЦИЯ



**A. ДЕЗИНФЕКЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ** (соблюдайте указания производителя по использованию средства)

⊘ Не погружайте инструмент в дезинфекционную ванну

ИЛИ

**B. ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ**

(соблюдайте указания производителя по использованию средства)

## 4 СМАЗКА



**A. СМАЗКА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА LUBRIFLUID**

- Перед использованием встряхните средство **Lubrifluid**
- Используйте насадку **Lubrifluid** ①\*
- Держите инструмент верхней частью вниз, закрыв ее влагопоглощающей тканью, и нажмите на кнопку средства **Lubrifluid** на 1 секунду
- Затем проверьте работоспособность инструмента в течение 30 секунд на низких оборотах, чтобы удалить возможные излишки смазочного средства
- Хранение сразу после смазки: поместите инструменты верхней частью вниз, чтобы остатки масла могли стечь

## 5 СТЕРИЛИЗАЦИЯ



**A. ПОМЕСТИТЕ УГЛОВОЙ НАКОНЕЧНИК В СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ ПАКЕТ**

**B. СТЕРИЛИЗУЙТЕ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

- Инструменты с символом  можно стерилизовать в автоклаве

⚠ Стерилизуйте только очищенные и смазанные инструменты

\* См. полный список артикулов насадок на последней странице документа.


# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




### SPRAYNET

чистящее средство в виде спрея, 500 мл  
6 штук в упаковке  
APT. 1600036-006

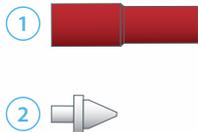


### LUBRIFLUID

смазочное средство в виде спрея, 500 мл  
6 штук в упаковке  
APT. 1600064-006

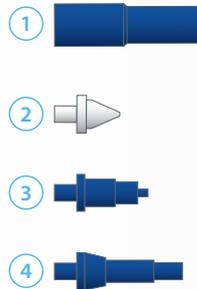

### AQUACARE

чистящее средство в виде спрея, 500 мл  
6 штук в упаковке  
APT. 1600617-006

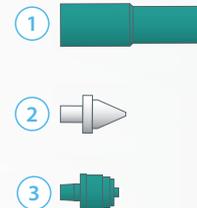

### LUBRICARE

Прибор для ухода за инструментами  
APT. 1600915-001



### LUBRIMED

6 картриджей в упаковке  
APT. 1600037-006



### ЧИСТЯЩАЯ ИГЛА

10 штук в упаковке  
APT. 1000001-010