



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ХИРУРГИЧЕСКИХ И ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКИХ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ


Обратитесь к инструкции по использованию средства для проведения комплексных процедур по уходу, очистке и стерилизации. Этот медицинский инструмент не является стерильным. Перед первым использованием выполните данную процедуру.

1 ПОДГОТОВКА



A. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА
B. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

2 ОЧИСТКА

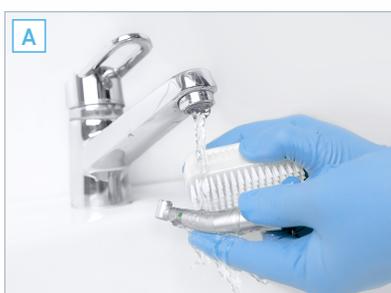

A. ОЧИСТИТЕ ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ <38 °C

B. ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ / ТОЛЬКО ДЛЯ СА 1:2.5

- Тщательно удалите жировые загрязнения и возможные отложения из спреевых каналов с помощью чистящей иглы
- Просушите спреевые каналы сжатым воздухом, а потом насухо вытрите весь инструмент тканью

⊗ **Никогда не погружайте инструмент в ультразвуковую ванну**



C. ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА AQUACARE

- Перед использованием встряхните средство Aquacare
- Используйте насадку Aquacare ①*
- Держите инструмент верхней частью вниз, закрыв ее влагопоглощающей тканью, и нажмите на кнопку средства Aquacare на **2 секунды**
- Используйте насадку Aquacare ③*



D. ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОЧИСТКА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА SPRAYNET

- Перед использованием встряхните Spraynet
- Используйте насадку Spraynet ①*
- Держите инструмент верхней частью вниз, закрыв ее влагопоглощающей тканью, и нажмите на кнопку средства Spraynet на 1 секунду
- Снаружи очистите угловой наконечник тканью, смоченной средством Spraynet

* См. полный список артикулов насадок на последней странице документа.

3

ДЕЗИНФЕКЦИЯ


A. ДЕЗИНФЕКЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

(соблюдайте указания производителя по использованию средства)

⊘ Не погружайте инструмент в дезинфекционную ванну

ИЛИ

B. ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

(соблюдайте указания производителя по использованию средства)



4

СМАЗКА


A. СМАЗКА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА LUBRIFLUID

- Перед использованием встряхните средство Lubrifluid
- Используйте насадку Lubrifluid ①*
- Держите инструмент верхней частью вниз, закрыв ее влагопоглощающей тканью, и нажмите на кнопку средства Lubrifluid на 1 секунду
- Затем проверьте работоспособность инструмента в течение 30 секунд на низких оборотах, чтобы удалить возможные излишки смазочного средства
- Хранение сразу после смазки: поместите инструменты верхней частью вниз, чтобы остатки масла могли стечь

5

СТЕРИЛИЗАЦИЯ


A. ПОМЕСТИТЕ УГЛОВОЙ НАКОНЕЧНИК В СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ ПАКЕТ
B. СТЕРИЛИЗУЙТЕ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

- Инструменты с символом  можно стерилизовать в автоклаве


⚠ Стерилизуйте только очищенные и смазанные инструменты

* См. полный список артикулов насадок на последней странице документа.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




SPRAYNET
чистящее средство
в виде спрея, 500 мл
6 штук в упаковке
АРТ. 1600036-006

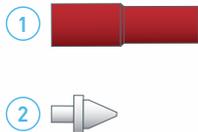

LUBRIFLUID
смазочное средство
в виде спрея, 500 мл
6 штук в упаковке
АРТ. 1600064-006

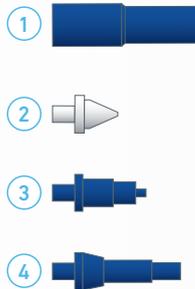

AQUACARE
чистящее средство
в виде спрея, 500 мл
6 штук в упаковке
АРТ. 1600617-006

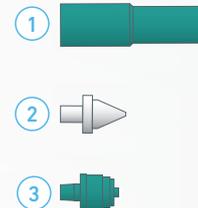

LUBRICARE 2
Прибор для ухода за инструментами
АРТ. 1601156-001



LUBRIMED
6 картриджей в упаковке
АРТ. 1600037-006



ЧИСТЯЩАЯ ИГЛА
10 штук в упаковке
АРТ. 1000001-010