

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

МИКРОМОТОРОВ С УГОЛЬНЫМИ ЩЕТКАМИ MC2 И MC3



Обратитесь к инструкции по использованию средства для проведения комплексных процедур по уходу, очистке и стерилизации. Этот медицинский инструмент не является стерильным. Перед первым использованием выполните данную процедуру.

1 ПОДГОТОВКА



A. ОТСОЕДИНИТЕ КАБЕЛЬ МОТОРА

B. СНИМИТЕ ГОЛОВКУ


2 ОЧИСТКА



A. НАРУЖНАЯ ОЧИСТКА

- Наружная очистка с помощью средства Spraynet


3 ДЕЗИНФЕКЦИЯ

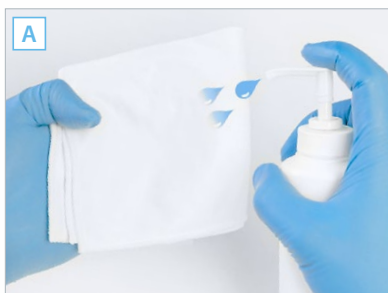

A. ДЕЗИНФЕКЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ (соблюдайте указания производителя по использованию средства)

- ⊘ Не погружайте инструмент в дезинфекционную ванну

4 СТЕРИЛИЗАЦИЯ

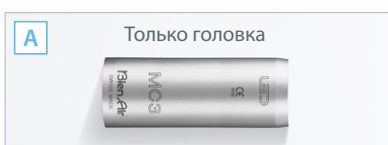

A. ПОМЕСТИТЕ ГОЛОВКУ МОТОРА В СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ ПАКЕТ

B. СТЕРИЛИЗУЙТЕ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

- Инструменты с символом  можно стерилизовать в автоклаве

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



SPRAYNET
чистящее средство в виде
спрея, 500 мл
6 штук в упаковке
APT. 1600036-006



LUBRIFIUID
смазочное средство в виде
спрея, 500 мл
6 штук в упаковке
APT. 1600064-006



AQUACARE
чистящее средство в виде
спрея, 500 мл
6 штук в упаковке
APT. 1600617-006



LUBRICARE
Прибор для ухода за
инструментами
APT. 1600915-001



LUBRIMED
6 картриджей в упаковке
APT. 1600037-006



ЧИСТЯЩАЯ ИГЛА
10 штук в упаковке
APT. 1000001-010