



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКИХ МИКРОМОТОРОВ МХ-і



Обратитесь к инструкции по использованию средства для проведения комплексных процедур по уходу, очистке и стерилизации. Этот медицинский инструмент не является стерильным. Перед первым использованием выполните данную процедуру.

1 ОЧИСТКА

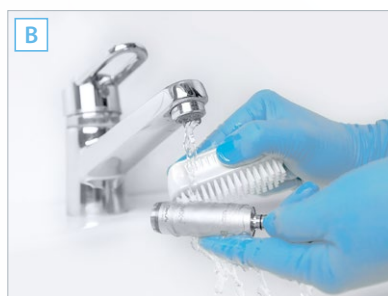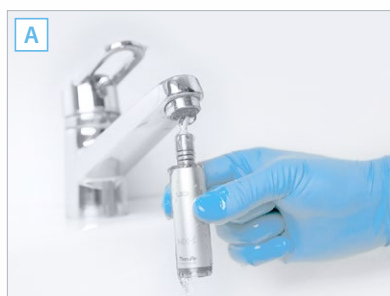

A. ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА

- Проведите очистку внутренней части инструмента проточной водой при температуре <38 °C

B. НАРУЖНАЯ ОЧИСТКА

- Проведите очистку наружной части инструмента проточной водой при температуре <38 °C

2 ДЕЗИНФЕКЦИЯ



A. ДЕЗИНФЕКЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ (соблюдайте указания производителя по использованию средства)

⊘ Не погружайте инструмент в дезинфекционную ванну

ИЛИ

B. ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

(соблюдайте указания производителя по использованию средства)

3 СТЕРИЛИЗАЦИЯ



A. ПОМЕСТИТЕ МОТОР В СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ ПАКЕТ

B. СТЕРИЛИЗУЙТЕ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

- Инструменты с символом  можно стерилизовать в автоклаве

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



SPRAYNET
чистящее средство в виде
спрея, 500 мл
6 штук в упаковке
APT. 1600036-006



LUBRIFIUID
смазочное средство в виде
спрея, 500 мл
6 штук в упаковке
APT. 1600064-006



AQUACARE
чистящее средство в виде
спрея, 500 мл
6 штук в упаковке
APT. 1600617-006



LUBRICARE
Прибор для ухода за
инструментами
APT. 1600915-001



LUBRIMED
6 картриджей в упаковке
APT. 1600037-006



ЧИСТЯЩАЯ ИГЛА
10 штук в упаковке
APT. 1000001-010