

# AVVERTENZA – Prima di utilizzare Lubrificare 2

Grazie per aver acquistato Lubrificare 2, dispositivo per la manutenzione dei manipoli odontoiatrici.

Lubrificare 2 è progettato per la manutenzione di manipoli odontoiatrici. Non usare Lubrificare 2 per scopi diversi da lubrificazione e lavaggio durante la manutenzione dei manipoli.

\* Il termine "lavaggio", come utilizzato nel presente documento, significa espellere e rimuovere detriti di taglio e oggetti estranei dall'interno del manipolo.


## Impostazione unità principale

Installare l'unità principale con almeno il gioco mostrato di seguito fornito intorno all'unità.


Il gioco per entrambi i lati è necessario per la sostituzione delle bombole spray.

Assicurarsi che il cavo di alimentazione e il tubo dell'aria siano collegati con margine sufficiente e che non siano in tensione.

### ■ Visualizzazione anteriore

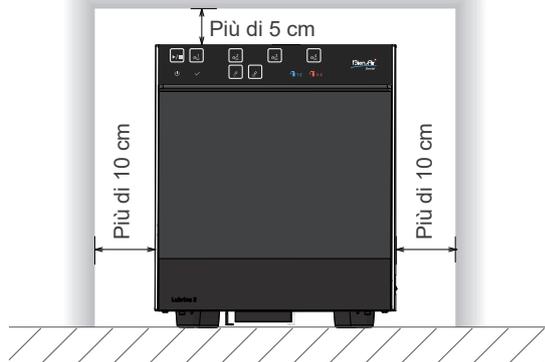

### ■ Visualizzazione superiore

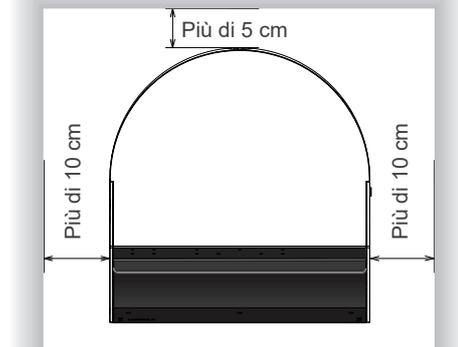

### ⚠ AVVERTENZA

- Non utilizzare il dispositivo vicino a fiamme libere o in qualsiasi luogo in cui potrebbe essere esposto a temperature elevate. Ciò potrebbe causare l'incendio o l'esplosione delle bombole spray installate.
- Installare l'unità principale in un luogo ben ventilato e ventilare regolarmente. Respirare fumi potrebbe danneggiare la salute.
- Non posizionare mai il dispositivo in un luogo concavo o coperto. Vi è il rischio di trattenere il gas infiammabile contenuto nelle bombole spray.

### ⚠ ATTENZIONE

- Posizionare il dispositivo su una superficie piana e stabile. Altrimenti vi è il rischio di ribaltamento o caduta.

